



# Conveen Protact

## Notendaleiðbeiningar

### Ábendingar

- Notist á rauða og erta húð.
- **Conveen** Protact myndar vörn og notast sem húðvörn í tengslum við þvagleka og lítils háttar hægðaleka. Hægt að nota sem fyrirbyggjandi húðvörn.
- Áhrifaríkt krem á mjög þurrar hendur, handleggi, fótleggi og fætur.
- Má nota undir hydrokolloidaplötur (Comfeel Plus og Assura) ef borið er mjög þunnt lag. Látið svæðið þorna í 5 mínútur og fjarlægið umfram magn af **Conveen** Protact með mjúkri þurrku.

### Notkunarleiðbeiningar

1. Hreinsið húðsvæðið vel með **Conveen** EasiCleanse eða vatni og sápu.
2. Skolið vel á eftir svo engir sápuafgangar séu á húðinni.
3. Þerrið húðina varlega.
4. Berið þunnt lag af **Conveen** Protact á allt útsetta húðsvæðið.
5. Endurtakið eftir þörfum.

### Rétt að hafa í huga

Ef ástandið lagast ekki eða versnar á innan við viku er rétt að athuga hvort um sveppasýkingu eða ofnæmi er að ræða.

### Geymsluskiyrði

**Conveen** Protact á að geyma við stofuhita og verja gegn sólarljósi.

	Fjöldi í pakkningu	Vörunúmer
<b>Conveen</b> Protact 50 g	6	65050
<b>Conveen</b> Protact 100 g	6	65100

