



# Conveen Critic Barrier

## Notendaleiðbeiningar

### Ábendingar

- Notist á **vessandi**, soðna og mjög erta húð.
- Hægt að nota undir hydrokolloida plötur, t.d. **Comfeel** Plus og Assura stómaplötur.
- **Conveen** Critic Barrier er áhrifaríkt og græðandi og veitir langtíma vörn gegn þvagi, hægðum og öðrum ertandi vessum.

### Notkunarleiðbeiningar

1. Hreinsið húðsvæðið sem á að meðhöndla og fjarlægjið svita, fitu og hægðir.
2. Notið gjarnan **Conveen** EasiCleanse í stað vatns og sápu. **Conveen** EasiCleanse má þó ekki nota á húðflöt þar sem festa á hydrokolloida- eða stómaplötu þar sem það inniheldur glycerin. Ekki nota Conveen EasiCleanse til að hreinsa sár.
3. Þerrið húðina vel.
4. Berið **Conveen** Critic Barrier á húðsvæðið. Ef húðin er mikið vessandi þarf kremið að ná að grípa áður en því er smurt varlega inn í húðina. Ef nota á kremið undir plötu skal borið þunnt lag af kremi, annars þykkt.

### Meðferðarlengd

- Rétt er að nota **Conveen** Critic Barrier þar til húðin er hætt að vessa eða þar til húðin er orðin alveg heil.

### Svona fjarlægir þú Conveen Critic Barrier

1. **Conveen** Critic Barrier er auðveldast að fjarlægja með **Conveen** EasiCleanse.
2. Einnig má fjarlægja **Conveen** Critic Barrier með olívuolíu/barnaolíu.
3. Það sem situr eftir af **Conveen** Critic Barrier undir plötu má fjarlægja með mjúkum klút vættum í heitu vatni.

### Rétt að hafa í huga

Ef ástandið lagast ekki eða versnar á innan við viku er rétt að athuga hvort um sveppasýkingu eða ofnæmi er að ræða.

### Geymsluskiyrði

**Conveen** Critic Barrier á að geyma við stofuhita og verja gegn sólarljósi.

	Fjöldi í pakkningu	Vörunr.
<b>Conveen</b> Critic Barrier 50g	6	66102
<b>Conveen</b> Critic Barrier 100g	6	66103

