

Notendaleiðbeiningar



Stabilon

Comfeel


Stabilon festiumbúðir

Stærð	Magn	Vörunúmer
10 x 10 sm	30 stk.	3800
15 x 15 sm	10 stk.	3803
20 x 20 sm	10 stk.	3806

Nánari upplýsingar veita hjúkrunarfræðingar



Lyngháls 13, 110 Reykjavík
Sími: 520-4316 / 4326
Netfang: coloplast@icepharma.is



www.coloplast.dk

WC0040

1. Ábendingar

- 1.1 Festiumbúðir og vörn fyrir umbúðir án líms (t.d. **SeaSorb**) sem notað er til meðhöndlunar á vessandi sár t.d. fótasár, þrýstingssár, fistla, holrými, skurðsár, gjafasvæði og yfirborðsbrunasár.

2. Notkunarleiðbeiningar

- 2.1 Stærð umbúða valin við hæfi. Filman á að vera 2 sm. stærri en undirliggjandi sáraumbúðir.
- 2.2 Yfirborðsfilman brotin við appelsínugulu örvarnar.
- 2.3 Fjarlægið munstraða blaðið á bakhliðinni.
- 2.4 **Stabilon** filman sett á með því að halda í hanskaævnu flipana.
- 2.5 Yfirborðsfilman fjarlægð.

3. Tíðni skiptinga

- 3.1 Skipt er um filmu um leið og skipt er um undirliggjandi sáraumbúðir.
- 3.2 **Stabilon** filman er gegnsæ. Það þýðir að auðvelt er að sjá hvenær tímabært er að skipta á sári.
- 3.3 Má vera á í allt að 7 daga.
- 3.4 Við notkun á sýkt sár eða sykursýkissár er ráðlagt að að skipta daglega undir eftirliti læknis eða hjúkrunarfræðings.

4. Filman fjarlægð

- 4.1 Filman toguð eftir húðinni í átt frá sárinu með annarri hendi. Á sama tíma skal halda um filmuna með hinni hendinni. Þannig teygist á filmunni og hún losnar frá án þess að særa húðina.

5. Athugasemdir

- 5.1 **Stabilon** má nota undir þrýstingsumbúðir.
- 5.2 Má ekki nota á þurr sár.
- 5.3 Ber að fjarlægja fyrir langtíma geislameðferð.
- 5.4 **Stabilon** er vatns- og bakteríuheld. Sjúklingur getur því farið í bað með umbúðirnar og bakteríur dreifast ekki út í umhverfið.

6. Geymsluskilyrði

- 7.1 Geymist við stofuhita.