

Alione Hydrokapillær umbúðir með límanti

Stærð	Stærð á púða	Magn	Vörunúmer
10 x 10 sm	6 x 6 sm	10 stk.	4610
12,5 x 12,5 sm	8,5 x 8,5 sm	10 stk.	4612
15 x 15 sm	10 x 10 sm	10 stk.	4615
20 x 20 sm	14 x 14 sm	10 stk.	4620
12 x 20 sm	8 x 16 sm	10 stk.	4625

Alione Hydrokapillær umbúðir án límants

Stærð	Stærð á púða	Magn	Vörunúmer
10 x 10 sm	6 x 6 sm	10 stk.	4630
12,5 x 12,5 sm	8,5 x 8,5 sm	10 stk.	4632
15 x 15 sm	10 x 10 sm	10 stk.	4635
20 x 20 sm	14 x 14 sm	10 stk.	4639
12 x 20 sm	8 x 16 sm	10 stk.	4645

Nánari upplýsingar veita hjúkrunarfræðingar



Lyngháls 13, 110 Reykjavík
Sími: 520-4316 / 4326
Netfang: coloplast@icepharma.is



www.coloplast.dk

WC0037

Notendaleiðbeiningar



Alione Hydrokapillær umbúðir

Alione



1. Ábendingar

- 1.1 **Alione** eru umbúðir sem geta dregið í sig mikinn vökva og eru fánlegar með og án hydrokolloid límkants.
- 1.2 **Alione** má nota á lítið, meðal og mikið vessandi fóta- þrýstings- og skurðsár.
- 1.3 **Alione** má nota í gegnum allt ságræðsluferlið.
- 1.4 **Alione** má nota á sýkt sár í samráði við lækni.
- 1.5 **Alione** má nota með þrýstingsmeðferð.

2. Notkunarleiðbeiningar

- 2.1 Sé húðin kringum sárið viðkvæm er rétt að nota **Alione** án límkants. Festið umbúðirnar með grisjubindi eða einhverju líku.
- 2.2 Sé húðin heil má nota **Alione** með límkanti.
- 2.3 Stærð umbúða valin við hæfi.
- 2.4 **Alione** sárapúðinn á að vera stærri en sárið.
- 2.5 Ekki má klippa umbúðirnar.

3. Tíðni skiptinga

- 3.1 Skiptið um **Alione** þegar umbúðirnar eru mettar þ.e. þegar sáravessinn hefur dreifst um allan púðann.
- 3.2 Þegar dregur úr sáravessanum má fækka skiptingum.
- 3.3 **Alione** má vera á sári í 7 daga.

4. Umbúðir fjarlægðar

- 4.1 **Alione** með límkanti er fjarlægt með því að toga umbúðirnar eftir húðinni í átt frá sárinu með annarri hendi. Á sama tíma skal halda um umbúðirnar með hinni hendinni. Þannig teygist á plástrinum og hann losnar frá húðinni án þess að særa hana.
- 4.2 **Alione** án límkants er fjarlægt eins og venjulegar umbúðir.
- 4.3 Sár og húð umhverfis á að hreinsa með volgu vatni eða saltvatni. Húðin á að vera þurr áður en nýjar umbúðir eru settar á.

5. Athugasemdir

- 5.1 **Alione** umbúðir með límkanti á ekki að nota á fótasár sykursjúkra.
- 5.2 Sár sem eru algerlega eða að hluta til vegna lélegs blóðflæðis í slagæðum ber lækni að líta á daglega.
- 5.3 **Alione** má nota á sýkt sár sem eru undir daglegu eftirliti læknis eða hjúkrunarfræðings.
- 5.4 **Alione** hentar ekki á sár með þurru svörtu drepri.

6. Geymsluskilyrði

- 6.1 Geymist við stofuhita.