

### Biatain Ag án límkants

Stærð	Magn	Vörunúmer
10x10	5 stk	9622
10x20	5 stk	9623
15x15	5 stk.	9625
20x20	5 stk	9626
5x7	5 stk.	5105
5x8 Filler	5 stk.	9628

### Biatain Ag með límkanti

Stærð	Magn	Vörunúmer
12,5x12,5	5 stk.	9632
18x18	5 stk.	9635
7,5x7,5	5 stk.	9631

### Biatain Ag sérsnið með límkanti

Stærð	Magn	Vörunúmer
Sakral 23x23	5 stk.	9641
Hæl 19x20	5 stk.	9643

Nánari upplýsingar veita hjúkrunarfræðingar



icepharma

Lyngháls 13, 110 Reykjavík  
Sími: 520-4316 / 4326  
Netfang: [coloplast@icepharma.is](mailto:coloplast@icepharma.is)




Coloplast

[www.coloplast.dk](http://www.coloplast.dk)

WC0066

## Notendaleiðbeiningar

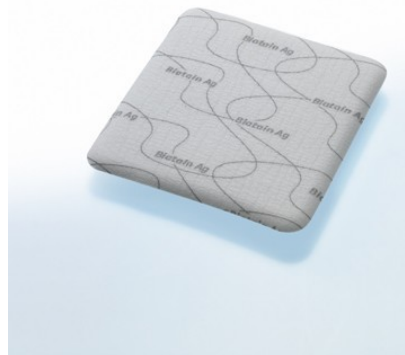

Biatain Ag án límkants  
Biatain Ag með límkanti  
Biatain Ag holufylling

**Biatain - Ag**



## 1. Ábendingar

- 1.1 **Biatain** Ag eru bakteríudrepanði svampumbúðir sem innihalda silfur og stuðla að rakri sárgræðslu.
- 1.2 **Biatain** Ag Filler er bakteríudrepanði svampfylling sem inniheldur silfur.

## 2. Ábendingar

- 2.1 **Biatain** Ag er fyrst og fremst ætlað á vessandi sár sem gróa seint og illa.
- 2.2 **Biatain** Ag án límkants má nota á fótasár sykursjúkra.

**Biatain** Ag má einnig nota:

- til að fyrirbyggja sýkingar hjá sjúklingum sem eiga vanda til að fá sýkingar eða hjá sjúklingum sem eru í áhættuhópi að fá sýkingar.
- á illa lyktandi sár til að draga úr lykt
- á sár sem virðast hafa staðnað í græðsluferlinu
- á sýkt sár undir eftirliti læknis eða hjúkrunarfræðings

- 2.3 **Biatain** Ag Filler er notað í holrými á meðal til mikið vessandi sárum og með áður nefndar ábendingar.

## 3. Notkunarleiðbeiningar: Biatain Ag

- 2.1 Stærð umbúða valin við hæfi. Umbúðirnar eiga að vera 2 sm stærri en sárið.
- 2.2 **Biatain** Ag án límkants:  
Munstraða hliðin með **Biatain** Ag nafninu snýr frá sárinu. Umbúðir festar með öðrum festiumbúðum.
- 2.3 **Biatain** Ag með límkanti:  
Umbúðir settar á með því að halda í hanskaævna flipann. Límflöturinn snýr að sárinu. Flipinn fjarlægður. Tryggja má betri festingu með því að hita kantana með höndunum.

## 4. Notkunarleiðbeiningar: Biatain Ag Filler

- 3.1 Hlíðarfilman fjarlægð fyrir notkun.
- 3.2 Stærð og dýpt sárs metin. **Biatain** Ag Filler er klippt í hæfilega stærð með sóttþreinsuðum skærum.

- 3.3 Sé sárið lítið til mikið vessandi má væta fillerinn með saltvatni til þess að koma í veg fyrir að hann sitji fastur í sárinu.

## 5. Tíðni skiptinga

- 5.1 Skipta ber um umbúðir skv. klínísku mati eða ef sáravessi er 2 sm frá kanti umbúðanna.
- 5.2 Má vera á sári í allt að 7 daga
- 5.3 **Biatain** Ag hefur bakteríudrepanði áhrif þar til umbúðirnar eru mettar af vessa.

## 6. Umbúðir fjarlægðar

- 6.1 **Biatain** Ag með límkanti er fjarlægður með því að toga eftir húðinni í átt frá sárinu með annarri hendi. Á sama tíma skal halda um umbúðirnar með hinni hendinni. Þannig teygist á límkantinum og hann losnar frá án þess að særa húðina.
- 6.2 Húðin umhverfis sárið er þerpuð áður en nýjar umbúðir eru settar á.
- 6.3 **Biatain** Ag Filler er fjarlægður með töng. Ef fillerinn situr fastur í sárinu verður að bleyta hann örlítið áður en hann er fjarlægður.

## 7. Athugasemdir

- 7.1 Má nota undir þrýstingsumbúðir.
- 7.2 Á sár sem þurfa daglegt eftirlit s.s. fótasár sykursjúkra er ráðlagt að nota **Biatain** Ag án límkants.
- 7.3 **Biatain** Ag má nota samfelld. Hins vegar ef engin framför er eftir 4 vikna notkun skal endurmeta ástand sársins m.t.t. hvort rétt sé að beita annarri meðferð.
- 7.4 Notkun með öðrum sáravörum getur dregið úr áhrifum silfursins.
- 7.5 Má ekki nota með hypoklorit lausnum (t.d. kloramin) eða vetnisperoxíði.
- 7.6 **Biatain** Ag getur valdið litbrigðum í sárinu sem hverfa við hreinsun sársins.

## 8. Geymsluskilyrði

- 8.1 Geymist við stofuhita.