

Biatain án límkants

Stærð	Magn	Vörunúmer
10x10	10 stk.	3410
10x20	5 stk.	3412
15x15	5 stk.	3413
20x20	5 stk.	3416
5x7	10 stk.	6105

Biatain m/límkanti

Stærð	Magn	Vörunúmer
12,5x12,5	10 stk.	3420
15x15	5 stk.	3421
18x18	5 stk.	3423
7,5x7,5	5 stk.	3462
18x28	10 stk.	3426
Sakral 17x17	5 stk.	3483
Sakral 23x23	5 stk.	3486
Hæl 19x20	5 stk.	3488

Biatain Soft-Hold

Stærð	Magn	Vörunúmer
10x10	5 stk.	3470
10x20	5 stk.	3472
15x15	5 stk.	3475
5x7	5 stk.	3473

Nánari upplýsingar veita hjúkrunarfræðingar



Lyngháls 13, 110 Reykjavík
Sími: 520-4316 / 4326
Netfang: coloplast@icepharma.is



WC0034

Notendaleiðbeiningar



Biatain án límkants
Biatain Soft-Hold
Biatain með límkanti

Biatain



1. Ábendingar

- 1.1 Til meðferðar á meðal til mikið vessandi sár, t.d. fótasár, þrýstingssár, 1. og 2. stigs brunasár, gjafasvæði eftir húðflutning, skurðsár og húðfleiður.
- 1.2 **Biatain** án límkants og **Biatain** Soft-Hold henta sérstaklega vel á sár þar sem húð umhverfis er viðkvæm. **Biatain** með límkanti má nota á sár með viðkvæma sárbarma því það er ekki er ekki lím á polyurethan-svampinum.

2. Notkunarleiðbeiningar: Biatain með límkanti

- 2.1 Setjið umbúðirnar á með því að halda í hanskaævna flipann og snúið límhlutunum að sárinu.
- 2.2 Fjarlægið síðan flipann. Hitið e.t.v. kantana með fingrunum.

3. Notkunarleiðbeiningar: Biatain án límkants og Soft-Hold

- 3.1 Stærð umbúða valin við hæfi. Umbúðirnar eiga að vera 2 sm stærri en sárið. Umbúðirnar má klippa til.
- 3.2 Munstraða hliðin með **Biatain** nafninu snýr frá sárinu. Umbúðirnar eru festar með festiumbúðum t.d. **Stabilon** filmu, grisju, plástri eða öðru sem hentar húð sjúklingsins.

4. Tíðni skiptinga

- 4.1 Skipta ber um umbúðir 3. - 4. hvern dag, eftir því hve mikið vessar og hvernig almennt ástand sársins er.
- 4.2 Má vera á sári í 7 daga.

5. Umbúðir fjarlægðar

- 5.1 Fjarlægið **Biatain** eða **Biatain** Soft-Hold. Þegar **Biatain** með límkanti er fjarlægt er best að toga umbúðirnar eftir húðinni í átt frá sárinu með annarri hendi og þá teygist á límkantinum og hann losnar án þess að særa húðina.
- 5.2 Sárið er skolað með volgu vatni eða saltvatni. (þar sem ekki myndast gel undir umbúðunum er ekki þörf á jafn ýtarlegri hreinsun eins og þarf þar sem gel myndast undir umbúðum). Húðin umhverfis sárið er þerruð.
- 5.3 Nýjar umbúðir settar á.

6. Athugasemdir

- 6.1 Má nota undir þrýstingsumbúðir.
- 6.2 Ef þörf er á hreinsun upp úr sári má nota umbúðirnar með **Purilon** geli.
- 6.3 Umbúðir ber að fjarlægja fyrir langtíma geislameðferð.
- 6.4 Má ekki nota með hypoklorit lausnum (t.d. kloramin) eða vetnisperoxíði.
- 6.5 Má nota á sár tengd sykursýki og sýkt sár undir eftirliti læknis.
- 6.6 **Biatain** með límkanti: Ef vessar úr sárinu meira en umbúðirnar ráða við, eða ef umbúðirnar hafa verið of lengi á, getur polyurethansvampurinn losnað frá límkantinum. Þetta hefur enga þýðingu en er ábending um að skipta þarf oftast um umbúðir á sárinu.

7. Geymsluskilyrði

- 7.1 Geymist lárétt við stofuhita.