

Stærð
19x20

Biatain hælaumbúðir

Magn
5 stk.

Vörunúmer
3488

Nánari upplýsingar veita hjúkrunarfræðingar



Lyngháls 13, 110 Reykjavík
Sími: 520-4316 / 4326
Netfang: coloplast@icepharma.is



www.coloplast.dk

WC0038

Notendaleiðbeiningar



Biatain hælaumbúðir

Biatain



1. Ábendingar

1.1 Til meðferðar á vessandi þrýstingssárum á hæl.

2. Notkunarleiðbeiningar: Biatain hælaumbúðir

- 2.1 Hlífaðarfilman á miðjum umbúðunum er fjarlægð (mynd 1). Haldið um hanskvænu flipana til að tryggja sterila ásetningu.
- 2.2 Umbúðirnar eru eins og ör í laginu. Örin er látin benda frá hæl að tám. Umbúðirnar eru beygðar í 90° milli örvaroddsins og endans (mynd 2).
- 2.3 Umbúðirnar eru fyrst festar neðan á fætinum og síðan upp eftir hælnum (mynd 3).
- 2.4 Hlífaðarfilman er tekin af öðrum hanskvæna flipanum og límkanturinn festur þannig að svamphlutarnir nái saman eða skarist (mynd 4).
- 2.5 Klemmið e.t.v. hornið saman til að loka umbúðunum. Endurtakið hinum megin (mynd 5).

3. Umbúðir fjarlægðar

- 3.1 Umbúðirnar togaðar eftir húðinni í átt frá sárinu með annarri hendi og á sama tíma er haldið við umbúðirnar með hinni. Þannig teygist á límkantinum og hann losnar frá húðinni án þess að særa hana.
- 3.2 Sárið er skolað eftir þöfum (þar sem ekki myndast gel undir umbúðunum er ekki þörf á jafn ýtarlegri hreinsun og þar sem gel myndast)
- 3.3 Nýjar umbúðir settar á.

4. Tíðni skiptinga

- 4.1 Skipta ber um umbúðir 3. - 4. hvern dag eftir því hve mikið vessar og hvernig almennt ástand sársins er.
- 4.2 Má vera á sári í allt að 7 daga

5. Athugasemdir

- 5.1 Ef þörf er á að hreinsa upp úr sári má nota umbúðirnar með **Purilon** Geli.
- 5.2 Umbúðirnar ber að fjarlægja fyrir langtíma geislameðferð.
- 5.3 Má ekki nota með hypoklorit lausnum (t.d. kloramin) eða vetnisperoxíði.
- 5.4 Má nota á sýkt sár undir eftirliti læknis.
- 5.5 Ef vessar úr sárinu meira en umbúðirnar ráða við eða umbúðirnar hafa verið of lengi, getur polyurethan svampurinn losnað frá límkantinum. Þetta hefur enga þýðingu, en er ábending um að skipta ætti oftár um umbúðir á sárinu.


6. Geymsluskilyrði

- 6.1 Geymist lárétt við stofuhita

Mynd 1



Mynd 2

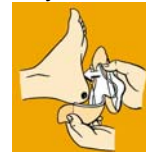

Mynd 3



Mynd 4



Mynd 5

