

Notendaleiðbeiningar



Physiotulle - Ag
 **Coloplast**

| | Physiotulle Ag | |
|--------------|-----------------------|------------------|
| Stærð | Magn | Vörunúmer |
| 10x10 cm | 10 stk. | 3926 |
| 15 x 15 cm | 10 stk. | 3927 |

Nánari upplýsingar veita hjúkrunarfræðingar



Lyngháls 13, 110 Reykjavík
Sími: 520-4316 / 4326
Netfang: coloplast@icepharma.is



www.coloplast.dk

1. Lýsing

- 1.1 **Physiotulle Ag** eru sterilar umbúðir sem innihalda silfursalt af sulfadiazini. Þær festast ekki í sárinu.

2. Ábendingar

- 2.1 **Physiotulle - Ag** er notað á lítið til mikið vessandi sár sem gróa hægt eða hafa staðnað í græðsluferlinu.
- 2.2 **Physiotulle Ag** má nota á fótasár sykursjúkra. **Physiotulle Ag** má nota með öðrum umbúðum
- fyrirbyggjandi til að koma í veg fyrir sýkingar hjá sjúklingum sem áður hafa fengið sýkingu í sár eða hjá þeim sem eru í áhættu með að fá sýkingu í sár
 - sár sem lykta illa út til að draga úr lykt
 - sár sem virka óheilbrigð
 - sýkt sár undir eftirliti læknis eða hjúkrunarfræðings.
 - sár sem verkja

3. Notkunarleiðbeiningar

- 3.1 Stærð umbúða valin við hæfi. Umbúðirnar eiga að vera a.m.k. 1 sm stærri en sárið.
- 3.2 Umbúðir festar með festiumbúðum.

4. Festiumbúðir

- 4.1 Val á festiumbúðum ræðst af því hve mikið vessar úr sárinu og ástandi húðarinnar í kring.
- 4.2 Meðal til mikið vessandi sár - notið **Biatain Ibu** (ef verkir), **Biatain** svampumbúðir eða **Alione** Hydrokapillær umbúðir.
- 4.3 Lítið vessandi sár – notið **Comfeel** Plus Transparent.

5. Tíðni skiptinga

- 5.1 **Physiotulle Ag** má vera á sárinu í allt að 3 daga, háð tegund sárs og vessamagni.

6. Arhugasemdir

- 6.1 **Physiotulle Ag** umbúðir geta litað sárbotninn. Liturinn næst auðveldlega af með vatni.
- 6.2 **Physiotulle Ag** umbúðir á ekki nota með öðrum umbúðum sem innihalda silfur.

7. Geymsluskilyrði

- 7.1 Geymist við stofuhita en mest við 25°C.