

	Purilon Gel	
Stærð	Magn	Vörunúmer
8 g	10 stk.	3906
15 g	10 stk.	3900
25 g	10 stk.	3903

Nánari upplýsingar veita hjúkrunarfræðingar



Lyngháls 13, 110 Reykjavík
 Sími: 520-4316 / 4326
 Netfang: coloplast@icepharma.is



www.coloplast.dk

WC0033

Notendaleiðbeiningar



Purilon Gel

Purilon



1. Ábendingar

- 1.1 Hentar til hreinsunar á gulu og svörtu drepri.
- 1.2 Hentar einnig til að viðhalda og endurheimta raka í þurr sár.

2. Notkunarleiðbeiningar

- 2.1 Miðinn (magabeltið) fjarlæggt af túpunni.
- 2.2 Stúturinn hreinsaður með sótthreinsipurrku eða líku.
- 2.3 Tappinn snúinn af stútnum.
- 2.4 Harmonikkunni þrýst saman og gelið sett beint í sárið (ath. ekki sleppa þrýstingnum fyrr en stúturinn hefur verið tekinn frá sárinu því annars getur sogast upp í hann aftur)
Holrými fyllt upp að húð. Ef um yfirborðssár er að ræða er sett þunt lag af geli yfir sárið (ca. 0,5 mm sem samsvarar gati túpunnar).

3 Festiumbúðir

- 3.1 Festibúnaður er valinn eftir því hve mikið sárið vessar og ástandi húðar umhverfis sárið.
- 3.2 Mikið vessandi – t.d. hægt að nota **SeaSorb** Soft með **Stabilon** filmu, **Biatain** umbúðir eða **Alione** Hydrokapillær umbúðir.
- 3.3 Minna vessandi – t.d. hægt að nota **Comfeel** Plus, **Comfeel** Plus Transparent eða annan frásogandi festibúnað.
- 3.4 Ef skipt er daglega á sárinu er ráðlagt að nota festiumbúðir sem límast ekki, til að vernda húðina umhverfis sárið.

4. Tíðni skiptinga

- 4.1 Þegar drep er þykkt og nær yfir stórt svæði er ráðlagt að skipta daglega til að hámarka hreinsunina.
- 4.2 Þegar drep er miðlungs stórt er ráðlagt að skipta a.m.k. þriðja hvern dag.
- 4.3 Þegar gelið er notað í hrein sár fer tíðni skiptinga eftir ástandi sárs og því magni sem vessar frá sárinu.
- 4.4 Þegar gelið er notað í sýkt sár eða sykrusýkissár er ráðlagt að skipta daglega undir eftirliti hjúkrunarfræðings eða læknis.

5. Hreinsun

- 5.1 Sárið er skolað með volgu vatni eða saltvatni.
- 5.2 Húðin umhverfis sárið er þerpuð með því að „dúppa“ á hana
- 5.3 Nýtt **Purilon** Gel sett í sárið.

6. Athugasemdir

- 6.1 Litabreytingar geta orðið þegar gelið sogar í sig vessa.
- 6.2 Notist ekki á 3. gráðu brunasár.

7. Geymsluskilyrði

- 7.1 Geymist við stofuhita.